

Instrukcja obsługi

NoseFrida® składa się z dwóch elementów: tuby oraz wężyka z zatyczką. Przed użyciem wymyj dokładnie obie części. Następnie umieść filtr higieniczny w otworze zatyczki i załóż zatyczkę na tubę, lekko ją dociskając, aż usłyszysz kliknięcie.



Ułóż dziecko w pozycji leżącej. Jeśli wydzielina jest gęsta, wkropl do nosa niewielką ilość soli fizjologicznej dostępnej w aptece. Przyłóż końcówkę przyrządu do otworu nosowego dziecka, a następnie wciągnij powietrze przez ustnik. W razie potrzeby - powtórz czynność.



Po każdym użyciu należy wymyć aspirator ciepłą wodą i płynem do mycia naczyń, dokładnie wypłukać oraz w razie potrzeby wymienić filtr higieniczny (min. raz dziennie).



Opakowanie zawiera aspirator NoseFrida® oraz **wymienne filtry higieniczne**. Dodatkowe filtry są dostępne w sprzedaży w osobnych opakowaniach.

UWAGA! Przechowuj Aspirator poza zasięgiem dzieci. Przyrząd w żadnym wypadku nie może być podłączany do jakichkolwiek urządzeń ssących.